



FreeStyle Libre 2

LibreView

Des données sur le glucose en un seul clic grâce à la plateforme numérique FreeStyle Libre

Accès à distance aux tendances glycémiques de vos patients pour des consultations mieux éclairées.

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus qui vivent avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice. L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. Données recueillies par le système FreeStyle Libre. Le système FreeStyle Libre 2 possède les mêmes caractéristiques que le système FreeStyle Libre, avec alarmes optionnelles en temps réel liées au taux de glucose. Par conséquent, les données de l'étude sont applicables aux deux produits. Les images ne servent qu'à des fins de présentation. Les données ne correspondent à aucun patient réel.



 **Abbott**
life. to the fullest.®

Les patients peuvent communiquer leurs données de glucose pour faciliter les rendez-vous virtuels ou en personne



FreeStyle Libre 2 

Une fonction optionnelle de l'appli FreeStyle Libre 2 qui permet aux patients de communiquer facilement leurs données de glucose à leurs praticiens au moyen de la plateforme LibreView[†]

LibreView

Optimiser le flux de travail

Les données sur le glucose de vos patients sont automatiquement téléversées[‡] dans LibreView, un système infonuagique sécurisé[§]

SE CONNECTER À UNE CLINIQUE VIRTUELLE à l'aide de l'appli FreeStyle Libre 2*

* Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus qui vivent avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice. † Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.LibreView.com pour en savoir plus. ‡ L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles. § LibreView est certifié ISO27001/27018/27701 et HITRUST CSF.

Obtenez des données sur le glucose de vos patients, des téléversements faciles et un accès à distance, le tout avec LibreView*

LibreView* est une plateforme infonuagique sécurisée† qui vous offre, ainsi qu'à votre équipe de soins de santé, des rapports de glucose pour éclairer davantage vos décisions de traitement.



Téléversements faciles

Surveillez le glucose de vos patients à distance avec des données sur le glucose téléversées automatiquement‡ de l'appli FreeStyle Libre 2§ de vos patients



Accès à distance

Optimisez votre flux de travail avec accès aux rapports les plus récents à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet



Rapports conviviaux

Les rapports de glucose sont conçus pour être faciles à comprendre et pour refléter des recommandations d'experts pour vous aider à découvrir des tendances cachées



* Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.LibreView.com pour en savoir plus. † LibreView est certifié ISO27001/27018/27701 et HITRUST CSF. ‡ L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles. § L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli.

Comment profiter au maximum de LibreView

- Surveillez vos patients
- Collaborez avec votre équipe de soins de santé
- Générez des rapports de glucose



LibreView* permet à vous et à votre équipe de soins de santé de surveiller et de visionner facilement les données sur le glucose de votre patient à partir du tableau de bord

Invitez de **NOUVEAUX** patients à partager leurs données sur le glucose avec votre clinique virtuelle

Tableau de bord des patients 0 filtre 8 colonnes Selon les 14 derniers jours de données disponibles du patient. 0/5

Prénom	Nom	Date de naissance	Dernières données disponibles	Tax de glucose moyen (mmol/L)	Nombre moyen de...	% dans la plage cible	Statut de l'utilisateur de LibreView
Charles	Patient(e) test	1/9/1960	14/8/2014	8,1	0		Connecté(e)
Claudia	Patient(e) test	1/9/1960	27/8/2014	9,3	0		Connecté(e)
John	Patient(e) test	1/9/1960	19/6/2014	9,1	0		Connecté(e)
Jordan	Patient(e) test	1/9/1960	19/1/2015	9,0	0		Connecté(e)
Juan	Patient(e) test	1/9/1960	29/9/2014	8,0	0	69	Connecté(e)
Mark	Patient(e) test	1/9/1960	4/11/2014	12,4	0		Connecté(e)
Pablo	Patient(e) test	1/9/1960	6/9/2014	7,0	0		Connecté(e)
Susanna	Patient(e) test	1/9/1960	21/11/2014	8,9	0	58	Connecté(e)
Yvonne	Patient(e) test	18/2/1963	28/3/2022	7,8	4	77	Pas invité(e) Inviter

Télécharger l'affichage actuel

- Sélectionnez les patients **ACTUELS** pour :
- Visionner l'historique de leur taux de glucose
- Les inviter à téléverser automatiquement† leurs données sur le glucose
- Générer des rapports de glucose

* Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.LibreView.com pour en savoir plus. † L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.

Créez votre clinique virtuelle pour collaborer avec les membres de votre équipe de soins

1 Configurez votre clinique virtuelle

2 Ajoutez des membres de votre équipe de soins de santé

3 Demandez à vos patients de partager leurs données

The screenshot shows the LibreView interface. On the left, there is a table of patients with columns for Prénom, Nom, Date de naissance, Dernières données disponibles, Tax de glucose moyen (mmol/L), and Nombre moyen de... The table lists several test patients. On the right, a sidebar menu is visible with the LibreView logo at the top. Below the logo, the user's name 'Pablo Test HCP' is shown. The menu items include 'Préférences pour les rapports', 'Paramètres du compte', 'Mes cliniques virtuelles' (highlighted with a red circle), and 'Se déconnecter'. At the bottom of the sidebar, there are links for 'Soutien à la clientèle', 'Germany / English', and 'Avis sur la confidentialité'.

The screenshot shows the 'Créer une nouvelle clinique virtuelle' form in LibreView. The form is titled 'Clinique virtuelle LibreView' and 'Créer une nouvelle clinique virtuelle'. It contains a section for 'Information sur la clinique virtuelle' with a warning: 'Ces renseignements apparaîtront avec votre nom lorsque vous vous connecterez à des patients ou à d'autres professionnels de la santé. Lorsque vous invitez des patients à téléverser les données de leurs lecteurs de glycémie à partir de chez eux au moyen de LibreView, ils verront ces coordonnées dans l'invitation. Veuillez vous assurer d'avoir saisi la bonne adresse de clinique virtuelle pour qu'ils puissent la vérifier.' Below this, there are input fields for 'Nom de la clinique virtuelle' (with a value 'Nom de la clinique'), 'ID de la clinique virtuelle' (with a value 'df6421b4f13a027b'), 'Adresse de la clinique virtuelle' (with a value 'Adresse 1'), 'Adresse 2 (facultatif)', 'Ville' (with a value 'Ville'), 'État/province' (with a value 'État/province'), and 'Code postal' (with a value 'Code postal'). There is also a 'Numéro de téléphone' field with the value '123456789'. At the bottom, there are 'Précédent' and 'Créer une clinique' buttons, with the latter highlighted by a red circle.

1. Ouvrez le menu **Paramètres**, sélectionnez **Mes cliniques virtuelles**, puis **Créer une nouvelle clinique virtuelle**.

- Révissez la section **Aperçu** pour continuer

2. Entrez l'ID de votre clinique virtuelle et sélectionnez **Créer une clinique**





Vous pouvez changer l'ID prédéterminé de la clinique virtuelle à quelque chose de plus facile à retenir, comme son numéro de téléphone

Ajoutez des membres de votre équipe de soins de santé pour qu'ils puissent accéder aux données sur le glucose des patients par eux-mêmes

1 Configurez votre clinique virtuelle

2 Ajoutez des membres de votre équipe de soins de santé

3 Demandez à vos patients de partager leurs données

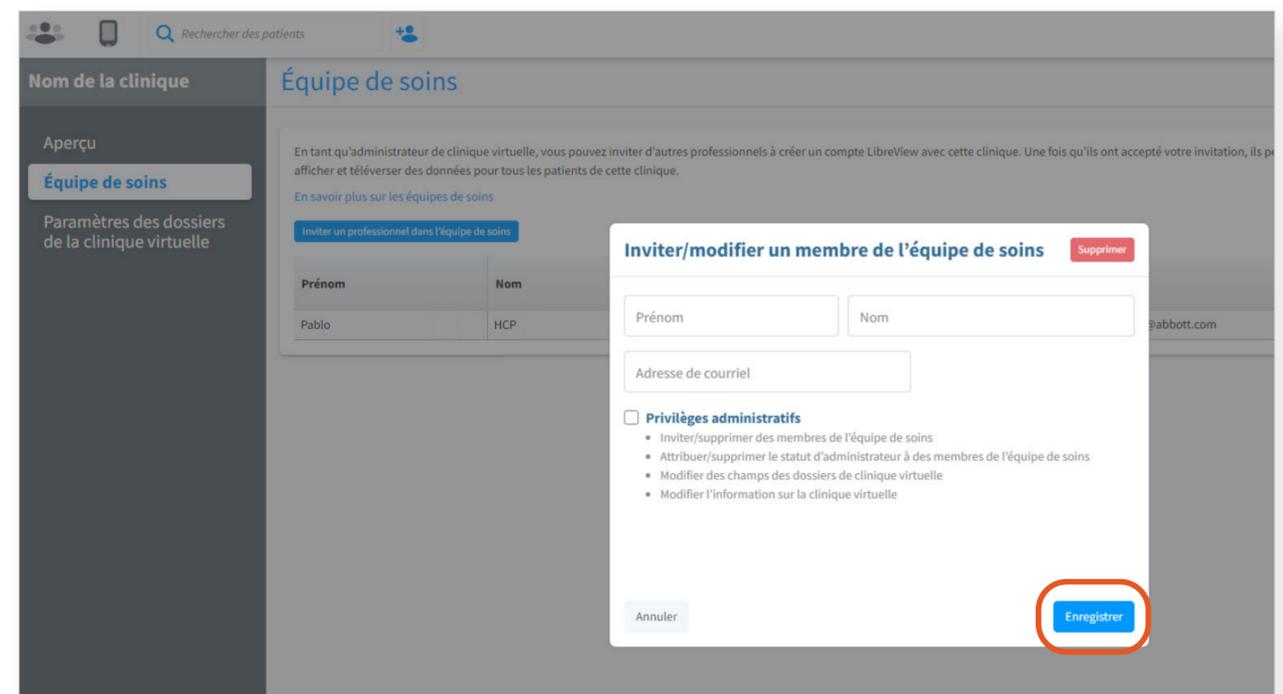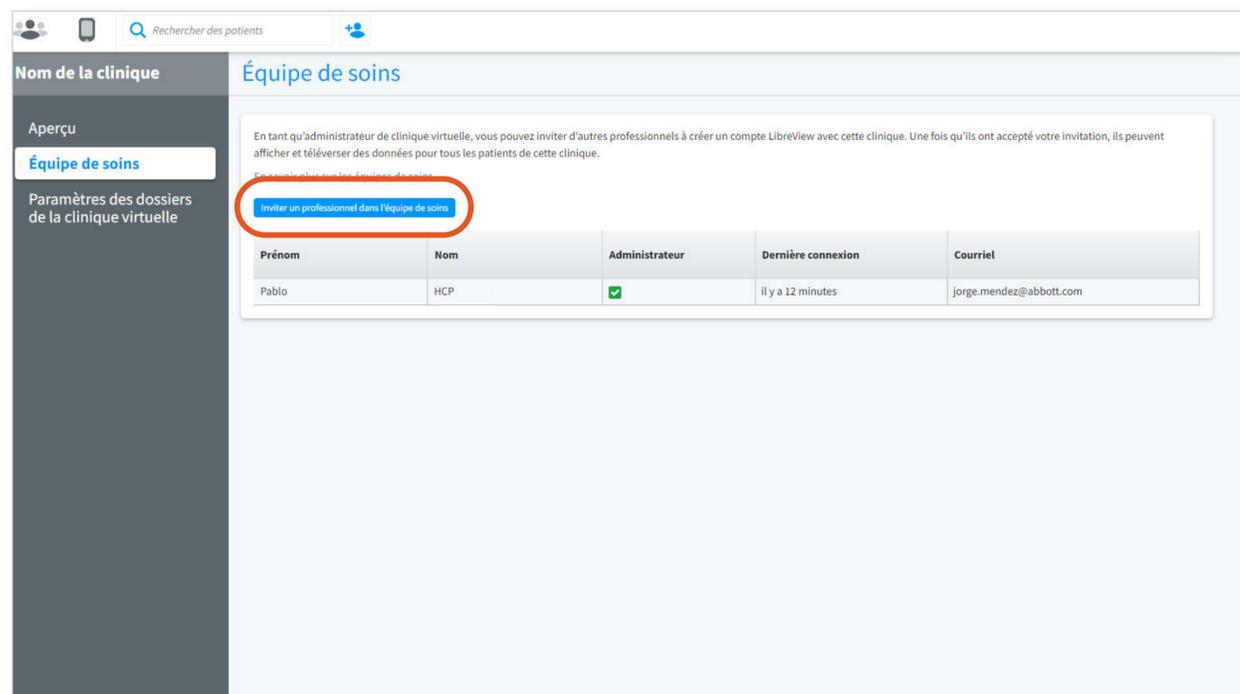

1. Ouvrez l'onglet **Équipe de soins** pour inviter des membres de votre pratique à accéder à LibreView*

- Dans la section **Aperçu**, sélectionnez **Inviter un professionnel dans l'équipe de soins**

2. Saisissez le prénom et le nom de famille du membre, cochez la case pour activer les privilèges administratifs, ajoutez son adresse courriel, puis sélectionnez **Enregistrer**

* Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.libreview.com pour en savoir plus.

Invitez vos patients à se connecter à votre clinique virtuelle pour partager leurs données sur le glucose à l'aide de l'ID de votre clinique virtuelle

1 Configurez votre clinique virtuelle




2 Ajoutez des membres de votre équipe de soins de santé

3 Demandez à vos patients de partager leurs données

Option 1 : Partagez l'ID de votre clinique virtuelle à vos patients

Option 2A : Invitez les patients existants

Option 2B : Invitez de nouveaux patients

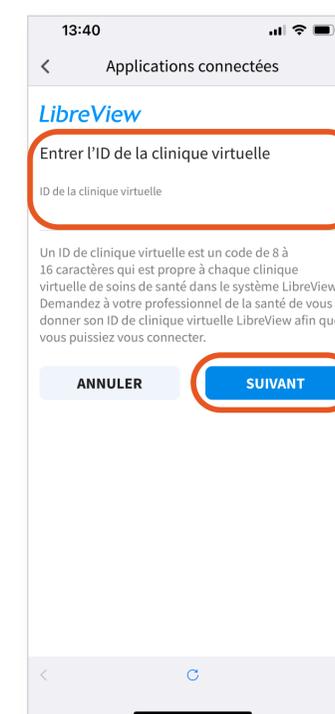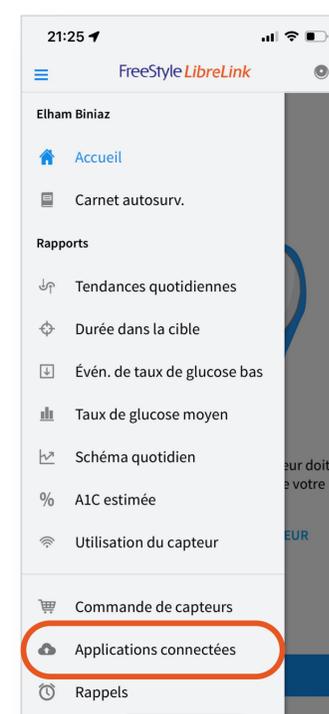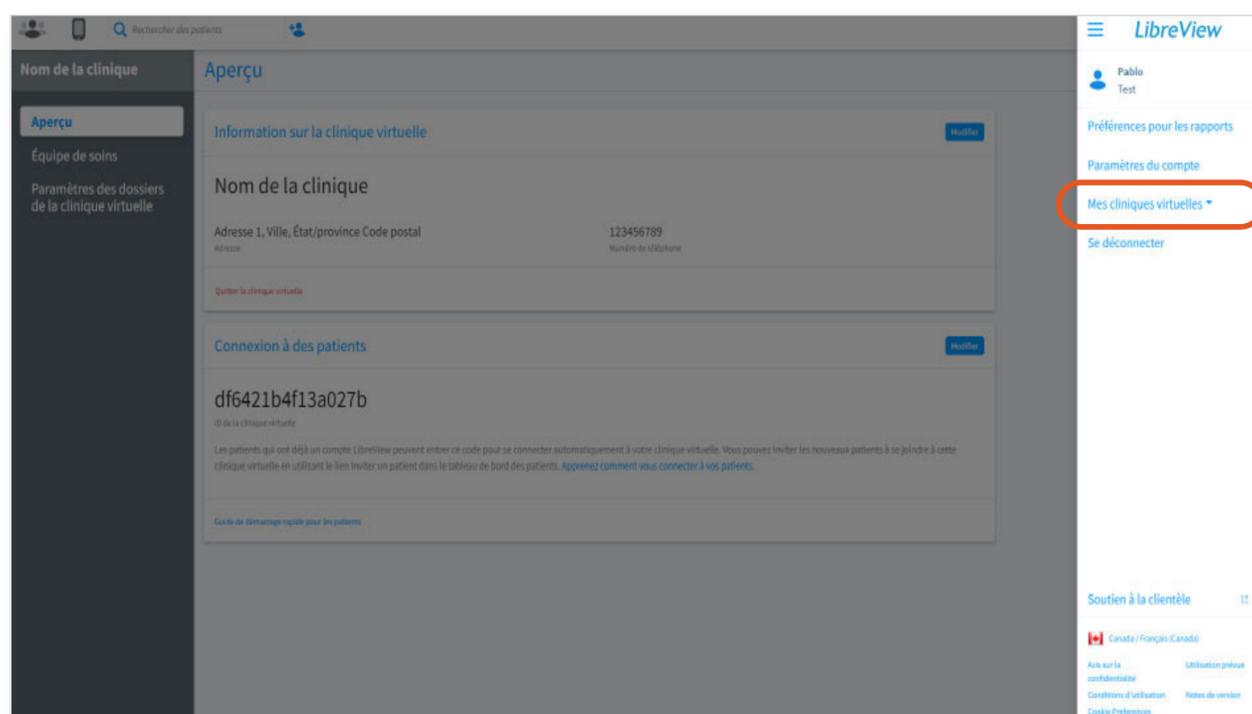

Comment repérer l'ID de votre clinique virtuelle :

1. Sélectionnez le menu **Paramètres**
2. Sélectionnez **Mes cliniques virtuelles** pour trouver l'ID de votre clinique virtuelle

Les patients doivent saisir l'ID de votre clinique virtuelle dans l'appli FreeStyle Libre 2* :

1. Dans l'appli, dans le menu **Paramètres**, sélectionnez **Applications connectées** et trouvez **LibreView**[†]
2. Sélectionnez **Se connecter à une clinique virtuelle** pour **entrer l'ID de la clinique virtuelle**, puis sélectionnez **Suivant** et **Connexion**

* L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. † Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.libreview.com pour en savoir plus.

Envoyez à vos patients existants une invitation à se connecter à votre clinique virtuelle pour partager leurs données sur le glucose

1 Configurez votre clinique virtuelle


2 Ajoutez des membres de votre équipe de soins de santé

3 Demandez à vos patients de partager leurs données


Option 1 : Partagez l'ID de votre clinique virtuelle à vos patients

Option 2A : Invitez les patients existants

Option 2B : Invitez de nouveaux patients

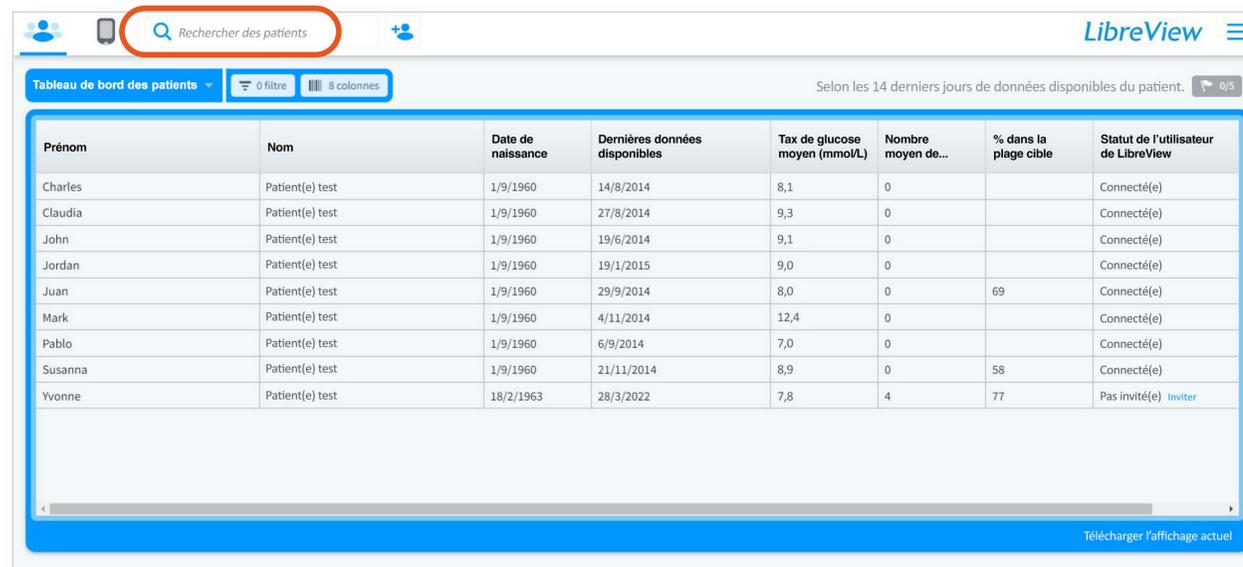

Prénom	Nom	Date de naissance	Dernières données disponibles	Taxe de glucose moyen (mmol/L)	Nombre moyen de...	% dans la plage cible	Statut de l'utilisateur de LibreView
Charles	Patient(e) test	1/9/1960	14/8/2014	8,1	0		Connecté(e)
Claudia	Patient(e) test	1/9/1960	27/8/2014	9,3	0		Connecté(e)
John	Patient(e) test	1/9/1960	19/6/2014	9,1	0		Connecté(e)
Jordan	Patient(e) test	1/9/1960	19/1/2015	9,0	0		Connecté(e)
Juan	Patient(e) test	1/9/1960	29/9/2014	8,0	0	69	Connecté(e)
Mark	Patient(e) test	1/9/1960	4/11/2014	12,4	0		Connecté(e)
Pablo	Patient(e) test	1/9/1960	6/9/2014	7,0	0		Connecté(e)
Susanna	Patient(e) test	1/9/1960	21/11/2014	8,9	0	58	Connecté(e)
Yvonne	Patient(e) test	18/2/1963	28/3/2022	7,8	4	77	Pas invité(e) Inviter

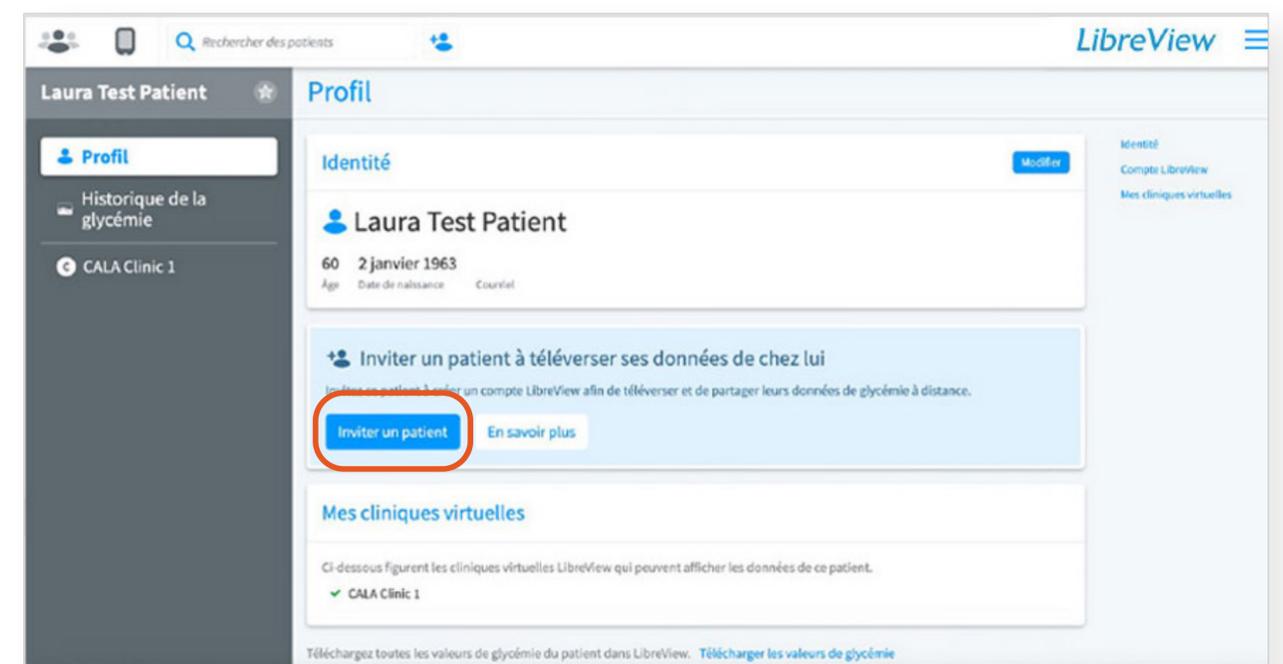

Inviter un patient à télécharger ses données de chez lui

Invitez vos patients à créer un compte LibreView afin de télécharger et de partager leurs données de glycémie à distance.

[Inviter un patient](#) [En savoir plus](#)

1. Recherchez un patient dans la barre de navigation supérieure et sélectionnez son nom

2. Dans le profil du patient, sélectionnez **Inviter un patient** et utilisez l'adresse courriel associée à son compte

3. Le patient recevra une invitation en attente à accepter dans l'appli. Une fois que le patient aura sélectionné **Invitation en attente** et **Accepter**, le partage des données sera activé avec votre clinique virtuelle

Envoyez à vos nouveaux patients une invitation à se connecter à votre clinique virtuelle pour partager leurs données sur le glucose

1 Configurez votre clinique virtuelle


2 Ajoutez des membres de votre équipe de soins de santé

3 Demandez à vos patients de partager leurs données


Option 1 : Partagez l'ID de votre clinique virtuelle à vos patients

Option 2A : Invitez les patients existants

Option 2B : Invitez de nouveaux patients

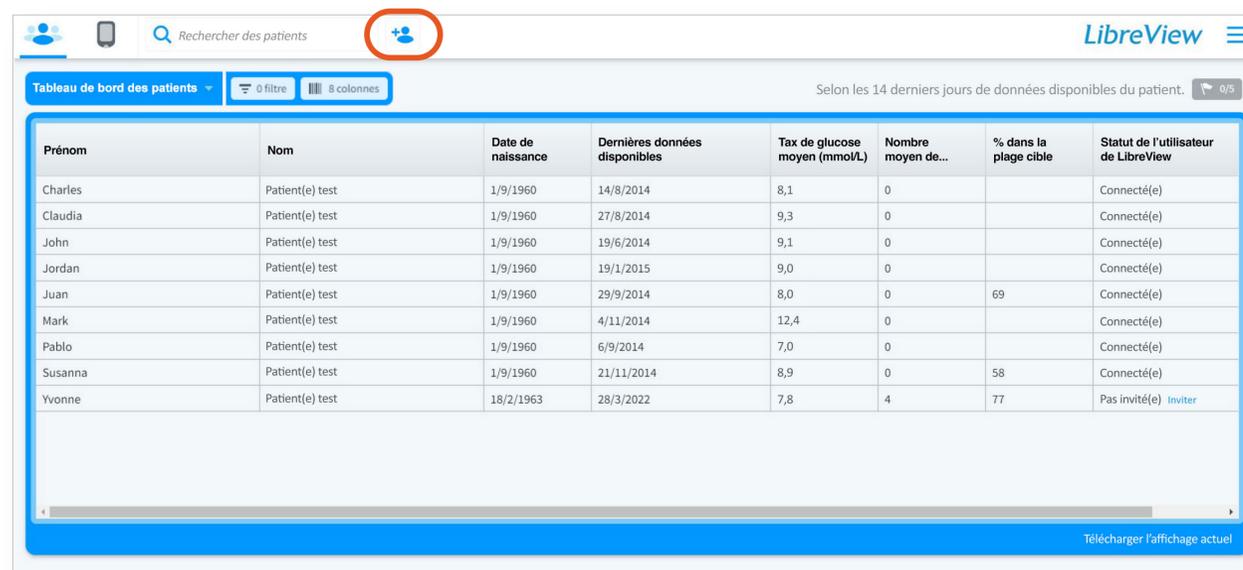

Prénom	Nom	Date de naissance	Dernières données disponibles	Tax de glucose moyen (mmo/L)	Nombre moyen de...	% dans la plage cible	Statut de l'utilisateur de LibreView
Charles	Patient(e) test	1/9/1960	14/8/2014	8,1	0		Connecté(e)
Claudia	Patient(e) test	1/9/1960	27/8/2014	9,3	0		Connecté(e)
John	Patient(e) test	1/9/1960	19/6/2014	9,1	0		Connecté(e)
Jordan	Patient(e) test	1/9/1960	19/1/2015	9,0	0		Connecté(e)
Juan	Patient(e) test	1/9/1960	29/9/2014	8,0	0	69	Connecté(e)
Mark	Patient(e) test	1/9/1960	4/11/2014	12,4	0		Connecté(e)
Pablo	Patient(e) test	1/9/1960	6/9/2014	7,0	0		Connecté(e)
Susanna	Patient(e) test	1/9/1960	21/11/2014	8,9	0	58	Connecté(e)
Yvonne	Patient(e) test	18/2/1963	28/3/2022	7,8	4	77	Pas invité(e) Inviter

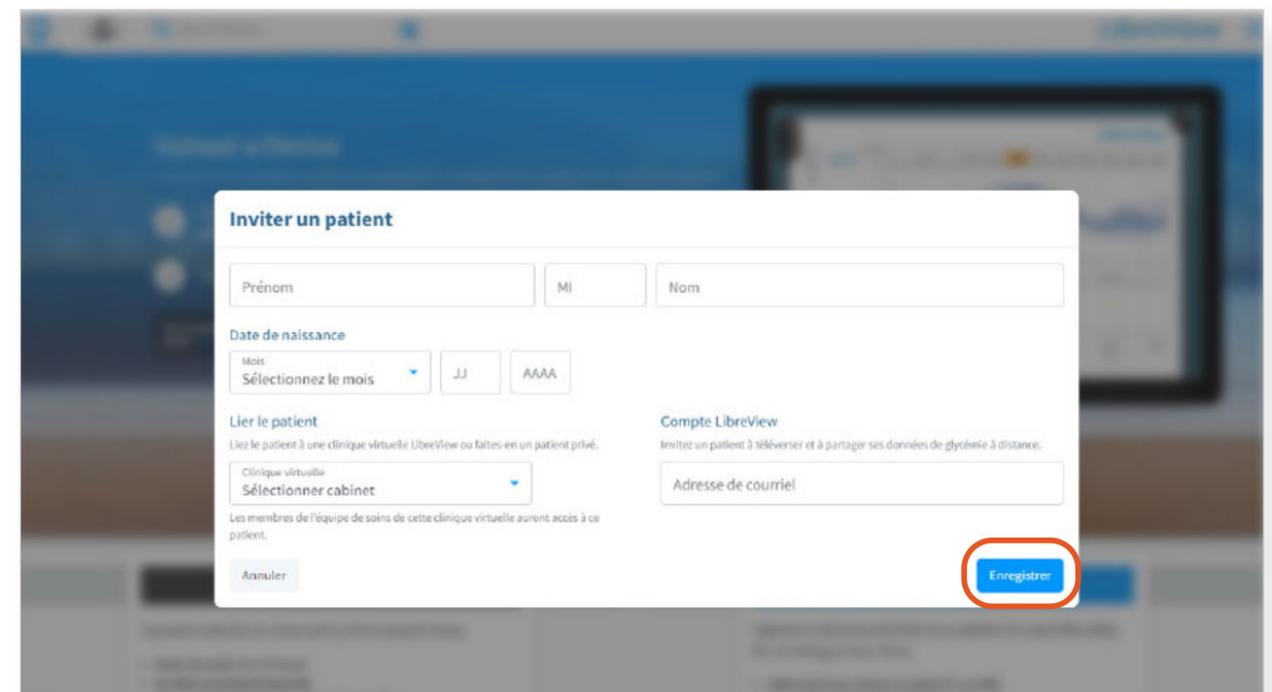

Inviter un patient

Prénom MI Nom

Date de naissance
Mois Sélectionnez le mois JJ AAAA

Lier le patient
Liez le patient à une clinique virtuelle LibreView ou faites-en un patient privé.
Clinique virtuelle Sélectionner cabinet

Compte LibreView
Invitez un patient à téléverser et à partager ses données de glycémie à distance.
Adresse de courriel


Les membres de l'équipe de soins de cette clinique virtuelle auront accès à ce patient.

1. Si un patient n'a pas de profil, sélectionnez l'icône **Ajouter un patient**  en haut de la barre de navigation

2. Saisissez le nom et la date de naissance du patient, sélectionnez la clinique virtuelle à laquelle vous désirez l'inviter et l'adresse courriel associée à son compte, puis sélectionnez **Enregistrer**

3. Le patient recevra une invitation en attente à accepter dans l'appli. Une fois que le patient aura sélectionné **Invitation en attente** et **Accepter**, le partage des données sera activé avec votre clinique virtuelle

Générer des rapports pour voir le profil glycémique complet des patients

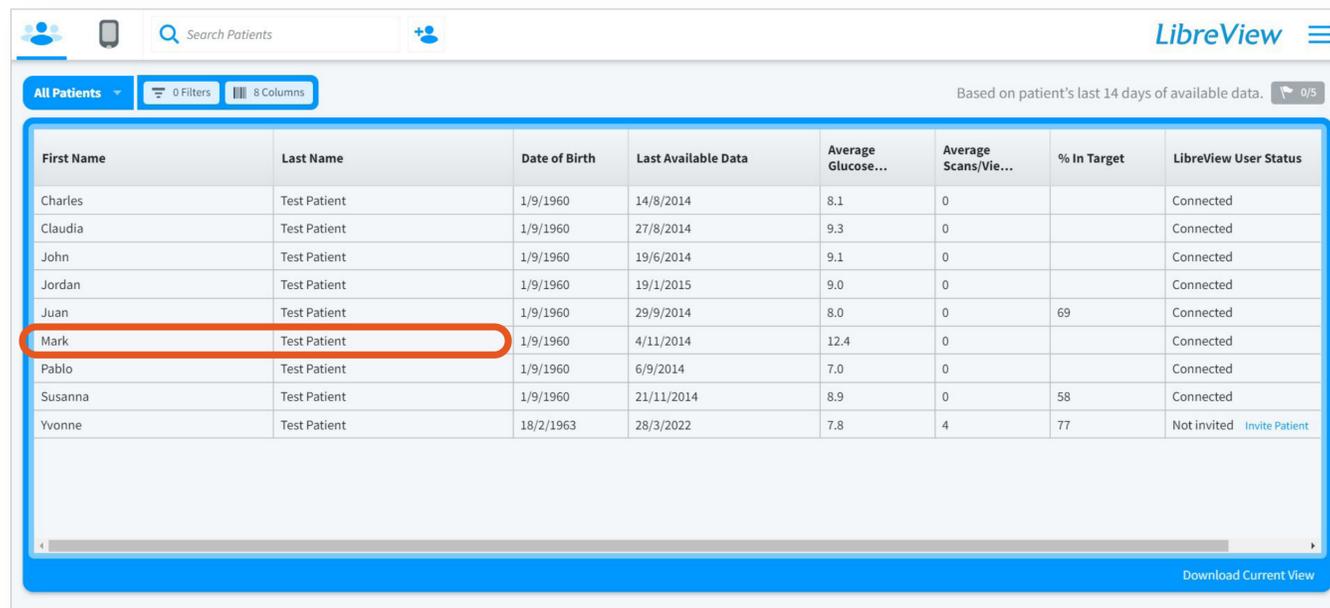


Based on patient's last 14 days of available data. 0/5

First Name	Last Name	Date of Birth	Last Available Data	Average Glucose...	Average Scans/Vie...	% In Target	LibreView User Status
Charles	Test Patient	1/9/1960	14/8/2014	8.1	0		Connected
Claudia	Test Patient	1/9/1960	27/8/2014	9.3	0		Connected
John	Test Patient	1/9/1960	19/6/2014	9.1	0		Connected
Jordan	Test Patient	1/9/1960	19/1/2015	9.0	0		Connected
Juan	Test Patient	1/9/1960	29/9/2014	8.0	0	69	Connected
Mark	Test Patient	1/9/1960	4/11/2014	12.4	0		Connected
Pablo	Test Patient	1/9/1960	6/9/2014	7.0	0		Connected
Susanna	Test Patient	1/9/1960	21/11/2014	8.9	0	58	Connected
Yvonne	Test Patient	18/2/1963	28/3/2022	7.8	4	77	Not invited Invite Patient

Download Current View

1. Sélectionnez le nom du patient et visionnez l'historique de son taux de glucose

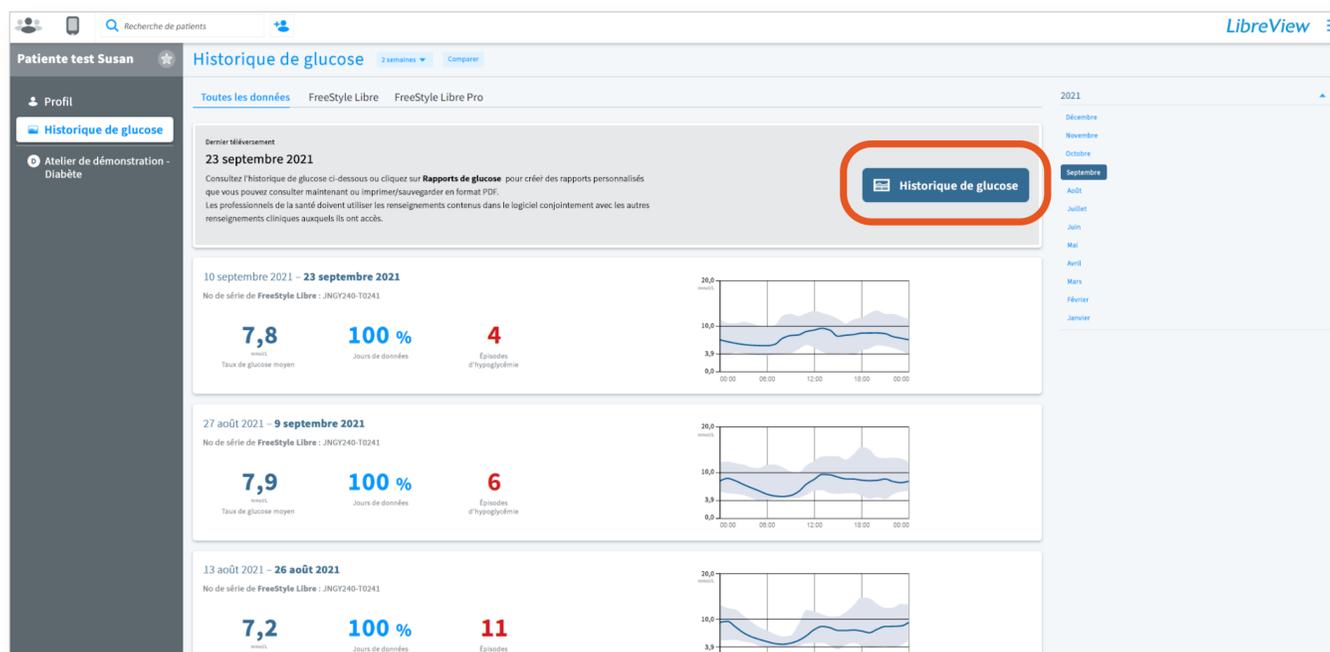

2. Sélectionnez **Historique de glucose** pour créer des rapports à imprimer ou à télécharger

FreeStyle Libre 2

Aidez vos patients à télécharger et à configurer l'appli FreeStyle Libre 2* ainsi qu'à y activer le partage des données dès aujourd'hui



Téléversements faciles

Surveillez le glucose de vos patients à distance avec des données sur le glucose téléversées automatiquement† de l'appli FreeStyle Libre 2 de vos patients*



Accès à distance

Optimisez votre flux de travail avec accès aux rapports les plus récents à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet



Rapports conviviaux

Découvrez les tendances de glucose grâce à des rapports conçus pour être faciles à comprendre et refléter des recommandations d'experts

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'Abbott pour les professionnels de la santé, au 1-800-461-8481, ou visitez la section « Support » sur www.LibreView.com.

LibreView

 **Abbott**
life. to the fullest.®

* L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. † L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.
© 2023 Abbott. Le boîtier du capteur, FreeStyle, Libre, et les marques connexes appartiennent à Abbott. ADC-77103-F v1.0